



easyTymp

Timpanometro de Cribado Portátil

easyTymp – Timpanómetro de Cribado Portátil

Rápido, portátil y con pantalla de operaciones táctil- nuestro easyTymp de mano realiza pruebas precisas de timpanometría y reflejos ipsilaterales en segundos. easyTymp no solo es rápido, también facilita el proceso de cribado para todos los profesionales, ayudando en el diagnóstico objetivo de patologías de oído medio. Cumple con IEC 60645-5 Tipo 2, ANSI S3.39 Tipo 3, asegurando resultados de prueba fiables y precisos.

Características Principales

- Mediciones rápidas y fiables del oído medio.
- Interfaz sencilla con pantalla táctil.
- Diseño compacto
- Tono de sonda de 226 Hz
- Frecuencias de reflejo ipsilateral: 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz
- Indicación clara de "Aprobado / Sin respuesta"
- Inicio automático para facilitar la operación
- Memoria interna para hasta 50 pacientes
- Accesorios Opcionales:
 - Impresora térmica inalámbrica
 - Base para carga y transferencia de datos al PC
 - Tono de sonda de alta frecuencia de 1 kHz
 - Software MAICO Sessions para gestión de datos.



Fundada para Facilitar el Cribado Auditivo

MAICO Diagnostics, fué fundada en 1937 por Leland A. Watson, para satisfacer la creciente necesidad de los médicos de una herramienta científica fiable para evaluar la pérdida auditiva.

Desde el principio, nuestra misión ha sido crear equipos de prueba auditiva precisos y fáciles de usar que apoyen la detección temprana de la pérdida auditiva y mejoren la calidad de vida en todo el mundo.

easyTymp – Aplicaciones para el Cribado Auditivo en Todas las Edades

Pediatría, Medicina Familiar y Atención en Urgencias

Evaluar la función del oído medio es clave en pediatría, medicina familiar y entornos de atención urgente, especialmente para afecciones comunes como la otitis media que pueden afectar la audición y el desarrollo. easyTymp ofrece una evaluación rápida y objetiva del oído medio, facilitando la integración de la timpanometría en la rutina clínica. Las mediciones automáticas comienzan al colocar el dispositivo en el oído, proporcionando resultados fiables en segundos. Con un tono de sonda de 226 Hz y uno opcional de 1 kHz para pruebas en lactantes, easyTymp permite un monitoreo eficiente, detección temprana y decisiones clínicas informadas.

Clínicas de Otorrinolaringología y Audiología

Completa tu batería de pruebas con easyTymp, optimizando los flujos de trabajo y apoyando decisiones clínicas seguras. Su diseño portátil permite flexibilidad de uso y fácil almacenamiento con la base. La timpanometría se realiza rápida y fácilmente en la sala de consulta para un diagnóstico más ágil. La prueba inicia automáticamente al colocar la sonda en el oído, entregando mediciones fiables en segundos. Diseñado para pacientes de todas las edades, incluye tono de sonda de 226 Hz, opcional de 1 kHz para lactantes y pruebas de reflejo en frecuencias clave. Su pantalla de alta resolución e interfaz intuitiva lo hacen ideal para cualquier entorno clínico.


easyTymp – Características y Beneficios

Mediciones Muy Rápidas del Oído Medio

El easyTymp es el dispositivo portátil ideal para pruebas de cribado del oído medio. La prueba comienza automáticamente al colocar la sonda en el oído, entregando mediciones rápidas y fiables en segundos. Ideal para pacientes de todas las edades, incluye tono de sonda de 226 Hz, opcional de 1 kHz para lactantes y pruebas de reflejo en frecuencias clave.

Resultados Claros y Sencillos

El easyTymp ofrece claridad inmediata mediante visuales inteligentes. Los resultados "Aprobado" / "Sin respuesta" se muestran claramente, junto con timpanogramas detallados, curvas de reflejo y datos numéricos en pantalla, facilitando la interpretación, explicación y continuidad del flujo de trabajo.

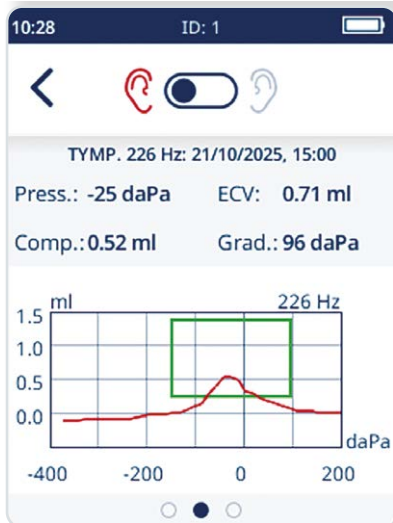

Pantalla Táctil Intuitiva y Diseño Compacto

easyTymp combina una pantalla táctil intuitiva con un diseño compacto y portátil para hacer las pruebas del oído medio simples y eficientes. El inicio rápido de pruebas y la operación con un solo toque permiten acceder a todas las funciones cómodamente con una mano, mientras que la pantalla a color de alta resolución y el diseño simplificado aseguran una navegación fluida y control preciso. Su tamaño reducido y peso ligero lo hacen ideal para clínicas ocupadas, atención móvil y espacios compartidos. Fácil de almacenar, transportar y usar, easyTymp ofrece practicidad diaria sin comprometer el rendimiento.




easyTymp Base

La base opcional easyTymp sirve como estación segura de carga y conectividad, asegurando que el dispositivo esté siempre almacenado, cargado y listo para usar. También permite la conectividad con PC para una gestión eficiente de datos, permitiendo transferir resultados de pruebas de forma rápida y fiable.



Gestión de Pacientes

Con capacidad interna para hasta 50 pacientes, easyTymp almacena fácilmente los resultados para su revisión y gestión posterior. Ya sea en la clínica o en movimiento, este almacenamiento integrado permite realizar pruebas durante todo el día sin necesidad de gestionar archivos entre sesiones, asegurando que los resultados estén disponibles cuando se necesiten.

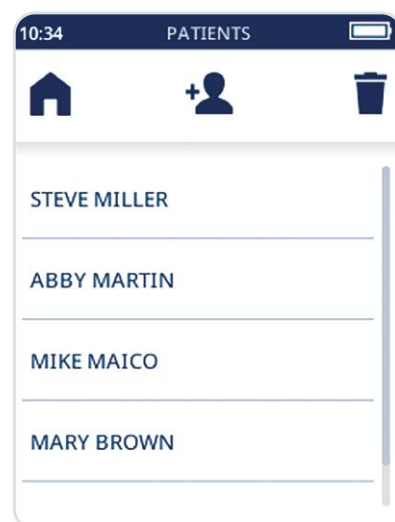

Gestión de Datos

easyTymp ofrece opciones flexibles para documentar y gestionar resultados. Elija una impresora térmica inalámbrica para impresiones inmediatas al finalizar la sesión, o utilice el software intuitivo MAICO Sessions para la gestión digital de datos. MAICO Sessions permite visualizar y organizar eficientemente las mediciones de timpanometría, generar informes PDF rápidamente o exportar archivos XML mediante conexión al PC, optimizando el flujo de trabajo. El software puede funcionar como solución independiente con base de datos integrada, integrarse con sistemas EMR mediante interfaces dedicadas o conectarse con las bases de datos de pacientes OtoAccess® o NOAH.



easyTymp – Componentes, Accesorios y Software



Dispositivo easyTymp



Base



Caja de olivas con
olivas



Cavidad de prueba



Impresora



Maletín de transporte



MAICO Sessions
Software PC

Los Componentes y accesorios varían según la
región y configuración.

Descubra más sobre otras soluciones MAICO

easyTone



Audiometría en
tableta rápida y
sencilla

touchTymp



Timpanometría intuitiva con pantalla
táctil y pruebas avanzadas



Global Contact:

MAICO Diagnostics GmbH

Sickingenstr. 70 - 71 · 10553 Berlin · Germany

Tel.: +49 (30) 70 71 46-50

sales@maico.biz · www.maico-diagnostics.com

US Contact:

MAICO Diagnostics US

10393 West 70th Street · Eden Prairie · MN 55344 · USA

Tel.: +1 (888) 941-4201 · Fax: +1 (952) 903-4100

info@maico-diagnostics.com · www.maico-diagnostics.com



01/2026